

W22480

老犬介護用

大型犬用 ~35kg

zuttone
ずっと一緒にいようね。
SENIOR DOG NURSING SERIES Produced by PETIO

マットタオル付 床ずれ予防ベッド

この説明書は大切に
保管してください。

安全にご使用いただくために下記事項を必ずお読みください。




- 本品は犬用です。適応体重以外の犬には使用しないでください。
- 本品は室内用です。屋外での使用はしないでください。
- 使用前に破損箇所がないかを必ず確認してください。
- 犬の健康状態を確認のうえ、使用してください。
- 事故防止の為、移動の際には必ず大人2人以上で行ってください。また、高い位置での移動や長時間の移動はしないでください。
- 本品をペットが噛んだり、引っかいたりしないように注意してください。
- 床ずれの症状がある場合は、獣医師に相談してください。
- 犬が嫌がる場合は、無理に使用しないでください。
- 幼児・子供には使用させないでください。
- 火気や水気のそばでの使用や保管はしないでください。
- 幼児・子供・ペットのふれない所に保管してください。

zuttone(ずっとね)とは...


ずっと一緒にいようね。それはみんなの願いです。
zuttone(ずっとね)は、愛犬の幸せな晩年をサポートするペティオの老犬介護用品シリーズです。

商品特長

- ・寝返りさせやすい広々スクエアタイプ
- ・室内の移動や寝返り補助に便利な持ち手付
- ・取り外し簡単、手洗い可能なマットタオル付なので、いつも清潔
- ・コットン100%パイル生地のマットタオルなので肌ざわり抜群
- ・通気性・体圧分散・形状安定・底冷え防止・弾力性に優れたウレタン2層構造

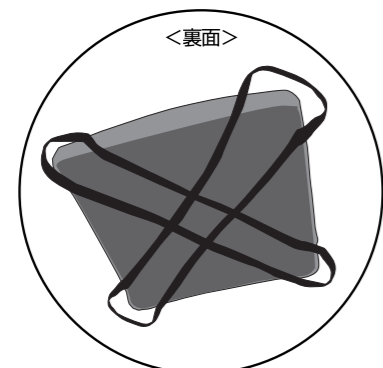

持ち手はしっかりと全身を支える仕様なので安心

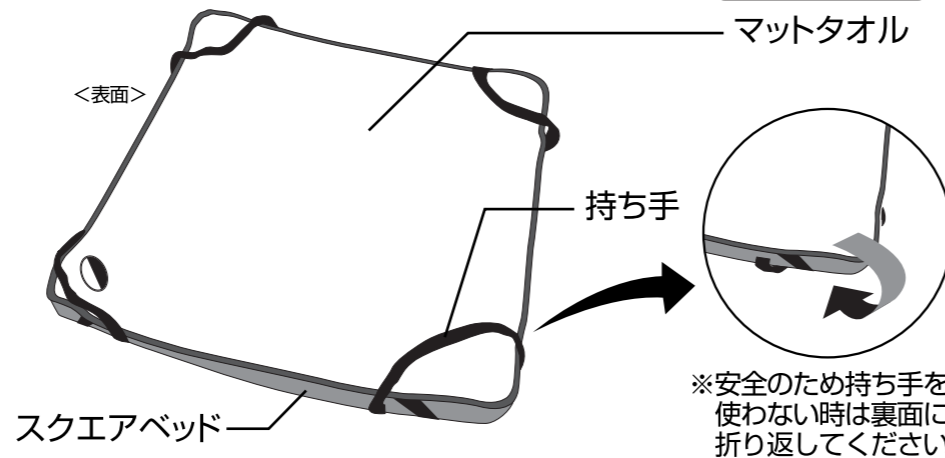

※安全のため持ち手を使わない時は裏面に折り返してください。

床ずれとは


長く寝ている状態が続くと圧迫の大きい部分や肌と肌がすれるところが床ずれになりやすくなります。特に肘や頭部・肩・腰、足の内側は注意が必要です。初めは皮膚の表面が赤くなり炎症を起こし、ひどくなると皮膚組織が壊死していきます。

こんな時にお使いください

- 寝たきりや横になっている事の多い老犬の
- ・快適な寝床に
- ・寝返り補助に
- ・室内の移動に


使用方法

マットタオルの付け方

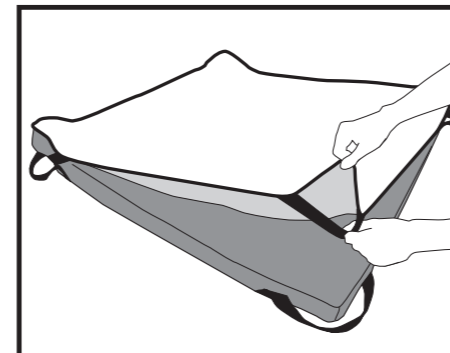


マットタオルを敷く場合はゴムバンドで四隅をしっかりと固定してください。
※事故防止の為、マットタオルのみで持ち上げないでください。

寝返り補助の仕方

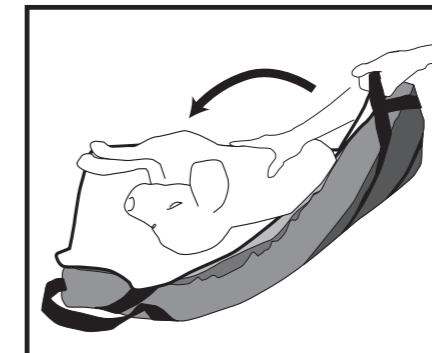

持ち手をしっかりと握り、ゆっくりと持ち上げ、寝返りさせてください。
※床ずれ予防には必要に応じて2~3時間毎に寝返りさせることで、効果的に床ずれを予防できます。

室内の移動の仕方

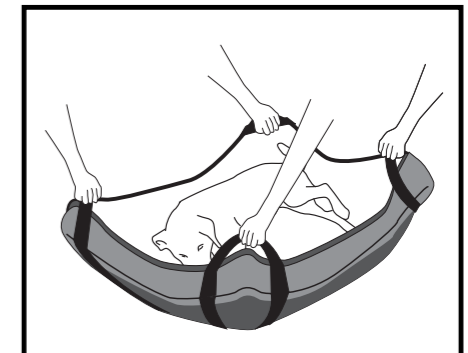

大人2人以上で持ち手をしっかりと握り、ゆっくりと持ち上げます。下に降ろす場合もゆっくりと行ってください。
※必ずワンちゃんが安定した姿勢でベッドに乗っていることを確認してから持ち上げてください。

お手入れ・保管方法

- 汚れたままでの使用や保管はしないでください。
- マットタオル・ベッドカバーが汚れた場合は、中性洗剤で軽く手洗いしてください。
- 芯材が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤を含ませた布等を固くしぼってふき取ってください。
- 洗濯機・乾燥機は使用しないでください。
- 漂白剤・ベンジン・シンナー等は使用しないでください。
- 洗濯により色落ちする場合がありますので、他のものとは一緒にしないでください。
- 洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし、完全に乾燥させてください。
- 直射日光・高温多湿の場所をさけて保管してください。

品質表示	
<マットタオル>	<ベッド本体>
生地/綿100%	表地/ポリエステル100%
パイピング/綿100%	裏地/ポリエステル100%
バンド/ポリプロピレン	芯材/ウレタンフォーム
	テープ/ポリプロピレン

- ★商品の仕様は、改良により予告なく変更する場合があります。
- ★この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。お気付きの点がありましたら、当社までお問い合わせください。

外袋 紙 台紙 MADE IN CHINA

株式会社 ヤマヒサ ペット事業部

本社 〒530-0028 大阪市北区万歳町3-25
お客様相談室 ☎ 0120-133-035
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・九州・沖縄
http://www.petio.com