

歩行補助ハーネス 後足用 **2L** サイズ

この説明書は大切に保管してください。

安全にご使用いただくために下記事項を必ずお読みください。

注意

●本品は犬の歩行補助(後足)専用です。他の用途には使用しないでください。●事故防止のため、**適応サイズ**・適応体重以外の犬には使用しないでください。●使用前に破損箇所がないかを必ず確認してください。傷みが目立ち始めたら新しい製品に買い替えてください。●犬の健康状態を確認のうえ、使用してください。●万一、異常が見られた場合は直ちに使用を中止し、獣医師に相談してください。●胴まわり調節ベルト部分は指が2~3本入る程度に装着し、しまり過ぎていないか、たえず点検してください。●犬が嫌がる場合は、無理に使用しないでください。●幼児・子供には使用させないでください。●火気や水気のそばでの使用や保管はしないでください。●幼児・子供・ペットのふれない所に保管してください。

商品特長 ※詳しい使用方法については内面をごらんください。

- ・装着したままでもオス・メス共に**排せつ可能**
- ・面ファスナーとワンタッチバックルで**着脱簡単**
- ・手にやさしい**持ち手クッションカバー付**
- ・負担のかかりにくい**軽量素材**使用

〈内側〉
抗菌
アンモニア
消臭
通気性メッシュ素材



商品サイズ表 ※適応犬種は標準体型・体重をもとにした目安です。


サイズ	適応犬種	体重	腰まわり(A)	後足まわり(B)	持ち手(C)
S	チワワ、ポメラニアン、ヨークシャーテリア、その他	4kgまで	28~36	~17	28~54
M	ミニチュアダックス、シーズー、その他	7kgまで	35~45	~24	30~57
L	柴犬、コーギー、シェルティ、ビーグル、その他	15kgまで	42~54	~27	19~35
2L	ポーターコリー、その他	20kgまで	48~60	~31	16~32
3L	ラブラドル、ゴールデン、その他	30kgまで	60~75	~40	14~31

※ご購入の際は必ずワンちゃんを実測のうえお買い求めください。

(cm)

ワンちゃんの測定方法

- A: 腰まわり(前足と後足の間を3等分した、後ろから1/3の部分)
B: 後足まわり(後足付け根の部分)
C: 持ち手(持ち手調節ベルトの角カンから持ち手上部まで)

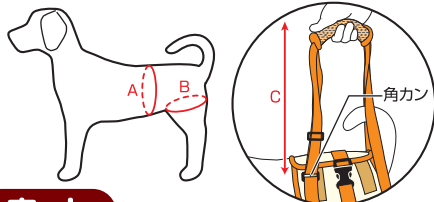

案内

- ★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- ★この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。お気づきの点がありましたら、当社までお問い合わせください。

販売者
株式会社 ヤマヒサ ペットケア事業部

本社 〒530-0028 大阪市北区万歳町3-25

お客様相談室 受付時間: 祝日を除く月~金曜日

☎ 0120-133-035 AM9:00~12:00/PM1:00~5:00


<http://www.petio.com>

MADE IN CHINA


K02

装着方法

※オス・メスで前後の装着方向が違いますので、ご注意ください。

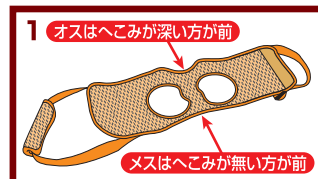


図のように後足通し穴にワンちゃんの後足を通します。

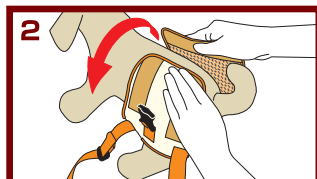

腰まわりをピッタリと包み込み、面ファスナーで留めます。
※ワンちゃんの毛を巻き込まないように注意してください。




腰まわりバックルの長さを調節し、ゆるまらないようにします。

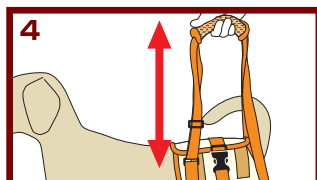

装着が完了したら、持ち手調節ベルトの長さを調節してください。

正しい使い方

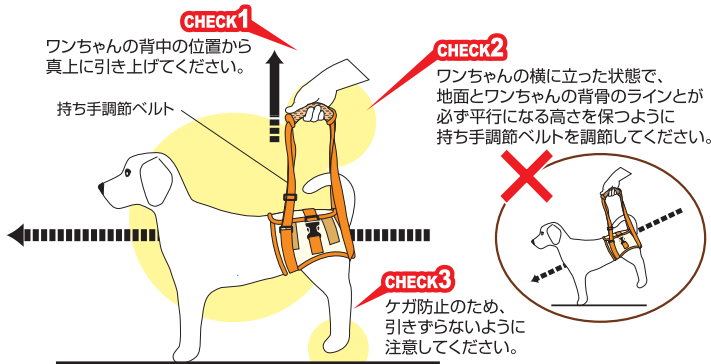

※ワンちゃんの歩行速度に合わせて進み、無理に引き過ぎないように注意してください。

お手入れ・保管方法

- 洗濯により色落ちする場合がありますので、他のものと一緒にしないでください。●洗濯機や乾燥機は使用しないでください。●汚れ等が気になる場合は、中性洗剤で軽く手洗いしてください。●漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコール等は絶対に使用しないでください。●洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし、完全に乾燥させてください。●直射日光・高温多湿の場所をさけて保管してください。



4 903588 236303

外装: PVC
紙